

# ULVERIN

## Tu Belleza Natural.

Regenera. Rejuvenece. Revitaliza.



 RoboMax

3.0mm / 4.5mm

7.0mm / 13.0mm

18.0mm


**Máxima calidad y  
precisión en el cartucho**



# INFORMACIÓN ULVERIN

Técnica de elevación para la piel  
no invasiva

Único tratamiento con efectos duraderos  
Sin tiempo de recuperación  
Sin heridas  
Tratamiento preciso, la dosis no daña el  
tejido circundante

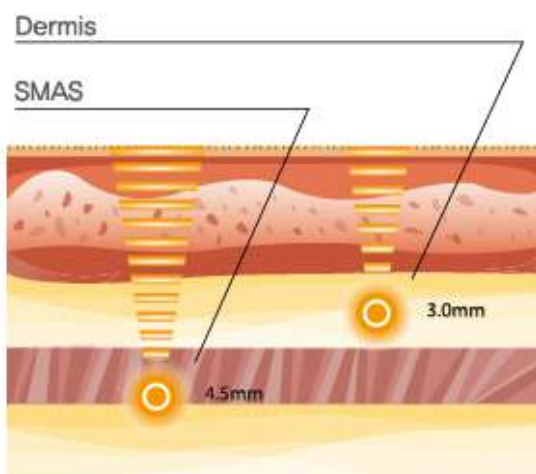

<b>3.0mm</b>	<b>4.5mm</b>
Elevación de cejas Nasolabial	Tensado Facial Mejora la elasticidad

## ESPECIFICACIONES ULVERIN

Name of Product	ULVERIN
Model number	HFR-1000A
KFDA license number	16-35
Dimension	410 x 290 x 90 (mm)
Weight	4.2 kg
Rated voltage / Frequency	100~240V, 60Hz
Maximum Output	0.15~1.5 (J)

## ULVERIN 180° Monitor de Rotación



## INTERFACE DEL USUARIO

Energy	1~10
Inerted Cartridge	3.0 / 4.5 / 7 / 13 (mm)
Length	Full / Half
Spacing	1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 (mm)

## ¿Qué es ULVERIN?

Los Ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU), convergen en el área de enfoque aumentando la temperatura de forma instantánea 60 ~ 80 °C, generando puntos de micro-coagulación. Esta energía desencadena una respuesta general debajo de la piel, activando un rápido proceso de regeneración. De forma natural nuestra piel renueva su colágeno, sustituyéndolo por un colágeno nuevo y más elástico. ULVERIN actúa en las capas más profundas de la piel, donde se encuentra el colágeno. Este innovador sistema es capaz de mejorar la piel desde dentro hacia afuera, dejando intacta la parte externa de la piel.

# INFORMACIÓN CARTUCHOS



3,0mm

Elevación de cejas, nasolabial.



4,5mm

Tensado facial, mejora la elasticidad.



7,0mm

Brazos, muslos, abdomen.



13mm

Tensado corporal, mejora la elasticidad.



18mm

Tensado corporal, mejora la elasticidad.


# Diseño Cartucho Facial



**3.0mm** Estrato objetivo

Dermis  
Elevación de cejas  
Nasolabial


## Cartucho 3.0mm

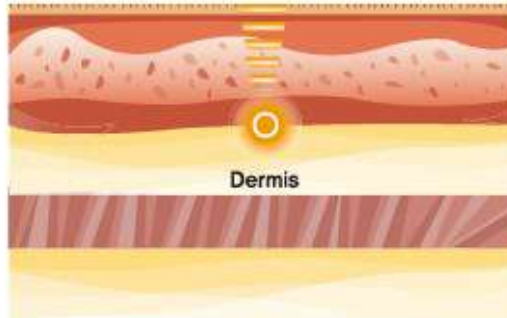

**4.5mm** Estrato objetivo

SMAS (Hot & Freezing Point)  
Tensado facial  
Mejora la elasticidad

## Cartucho 4.5 mm

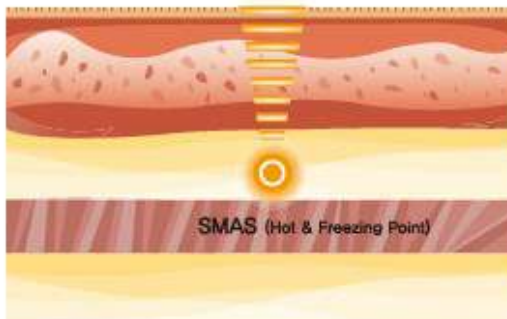

## Resultados Clínicos Cartucho 3.0mm / 4.5mm



# Diseño Cartucho Corporal




7,0mm Estrato Objetivo

Capa de grasa

Brazos, abdomen, muslos

Cartucho 7.0 mm

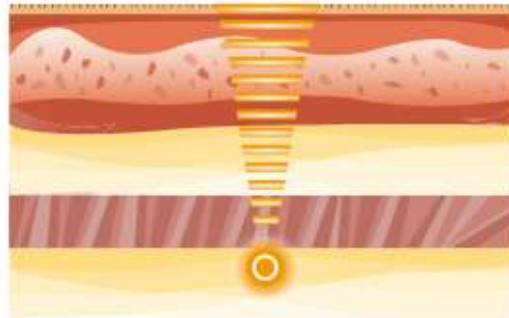

Capa de grasa




13mm Estrato Objetivo

Subcutáneo

Tensado corporal,  
Mejora la elasticidad

Cartucho 13mm

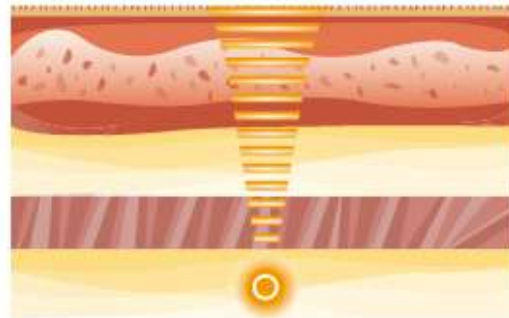

Subcutáneo

## Resultados Clínicos Cartucho 7.00mm / 13mm



# Diseño Cartucho Corporal




18mm Estrato Objetivo

Subcutáneo Corporal + Grasa Corporal

Tensado Corporal  
Mejora la elasticidad

Cartucho 18 mm

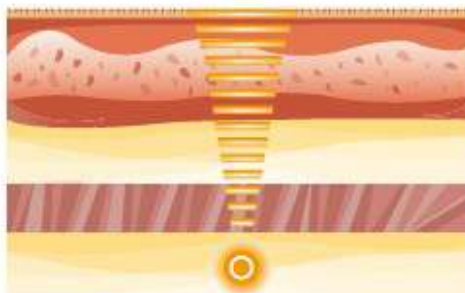

Subcutáneo Corporal  
+  
Grasa Corporal

## Resultados Clínicos Cartucho 18mm



Before



After



Before



After



# X1

3.0mm / 4.5mm  
Cartucho de Energía



7.0mm / 13.0mm  
Cartucho de Energía

# X2

# X4



Cartucho de Energía

# 18.0mm

Nombre del producto	ULVERIN (ULTRA SOUND FORCE)
Modelo	HFR-1000A
Dimensiones	410 X 290 X 90 ( mm )
Peso	4.2 Kg
Separación entre puntos	1.0/ 1.5/ 2.0/ 3.0(mm)
Cartuchos	4.3Mhz – 3.0mm / 4.5mm / 7mm / 13mm / 18 mm
Longitud	Total /Medio
Voltaje/ Frecuencia	100~240V, 60Hz
Wattios consumidos	220VA
Potencia suministrada	120 W
Tamaño del punto	0,5 mm <sup>2</sup>
Densidad de Energía suministrada	3,6 J/mm <sup>2</sup>